

LECTUS DL3 PLUS

DETERGENTE TRIENZIMÁTICO

proteasa
lipasa
amilasa

Laboratorios
LECTUS
Confianza en
desinfección



1

Colocar agua en una batea (No exceder los 45°C). Agregar Lectus DL3 plus en la proporción deseada




2

Sumergir completamente el instrumental quirúrgico o dispositivo médico en solución de lavado.



3

Cepillar si fuera necesario. Para material endoscópico utilizar escobilla

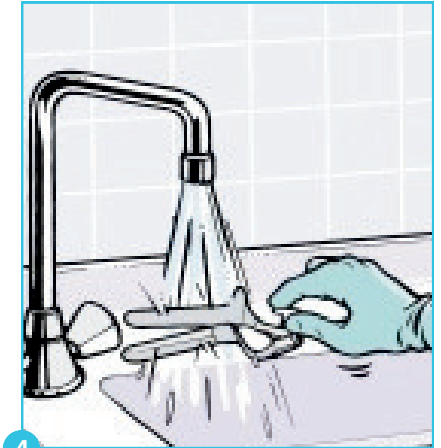

4

Enjuagar con abundante agua



5

Secar con un campo limpio

Litros de agua	ml de detergente
1L	5ml
5L	25ml
10L	50ml
12L	60ml