


LECTUS DL5

DETERGENTE PENTAENZIMÁTICO - LAVADO MANUAL

proteasa
lipasa
amilasa

glucanasa
mananasa

Laboratorios
LECTUS
Confianza en
desinfección

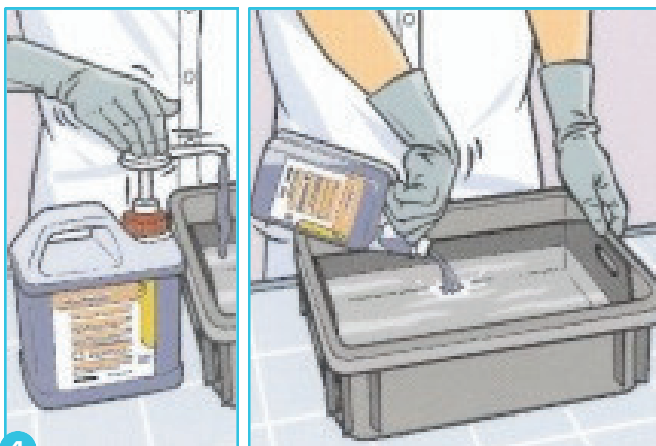

1

Colocar agua en una batea (No exceder los 45°C). Agregar Lectus DL5 en la proporción deseada



2

Sumergir completamente el instrumental quirúrgico o dispositivo médico en solución de lavado.



3

Cepillar si fuera necesario. Para material endoscópico utilizar escobilla



4

Enjuagar con abundante agua



5

Secar con un campo limpio

DILUCIÓN RECOMENDADA PARA LAVADO MANUAL

ml de detergente en 1L de agua	tiempo de contacto eficaz a partir de
2,5ml	5 minutos
5ml	1 minuto