


# LECTUS MTU

proteasa  
lipasa  
amilasa

Laboratorios  
**LECTUS**  
Confianza en  
desinfección

## DETERGENTE TRIENZIMÁTICO

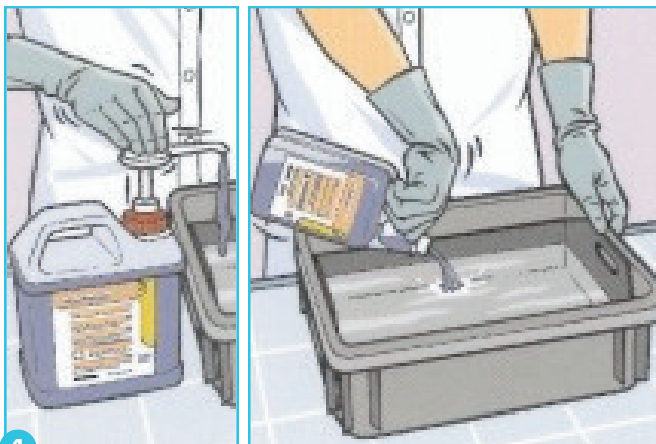


1 Colocar agua en una batea (No exceder los 45°C). Agregar Lectus MTU en la proporción indicada



2 Dejar actuar 5 minutos  
Sumergir completamente el instrumental quirúrgico o dispositivo médico en solución de lavado



3 Cepillar si fuera necesario. Para material endoscópico utilizar escobilla

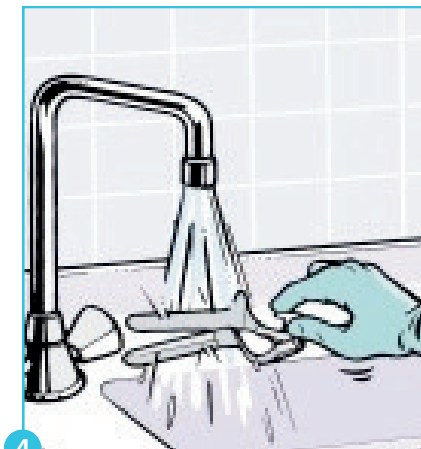

4 Enjuagar con abundante agua



5 Secar con un campo limpio

Litros de agua	ml de detergente
1L	2ml
5L	10ml
10L	20ml
12L	24ml