

# LECTUS R44

## RENOVADOR DEL INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE

### MODO DE EMPLEO

Antes de utilizar el producto, protegerse adecuadamente con guantes y protección ocular

- Solución concentrada
- Dilución recomendada: 5% en agua

LITROS DE AGUA

1L

ML DE PRODUCTO

50ml

- 1) Sumergir el instrumental en el recipiente de remojo
- 2) Tiempo de remojo: 1 a 2 horas controlando el estado del instrumental cada 30 minutos.
- 3) Extraer el instrumental del baño cuando esté bien pulido
- 4) Enjuagar con abundante agua y secar
- 5) Renovar el baño de remojo al menos una vez al día

### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Elimina las manchas de óxido
- ✓ Utilización en remojo: dosificador incorporado
- ✓ Suprime los depósitos minerales
- ✓ Para pulir instrumentos de acero inoxidable



Laboratorios  
**LECTUS**  
Confianza en  
desinfección