

# LECTUS DL3 PLUS

DETERGENTE TRIENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL



Indicado para limpieza de instrumentos médico-quirúrgicos en recipiente de remojo, o en recipientes de ultrasonido.


## CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Detergente bacteriostático y fungistático a la dilución de uso
- Ausencia de biocontaminación del baño en remojo
- Complejo trienzimático detergente de alto rendimiento
- Control de corrosión
- Seguridad y facilidad de uso
- pH neutro: compatibilidad con todo tipo de materiales
- Se puede utilizar en agua fría y caliente

## PRODUCTO A DILUIR

→ Dilución de uso 0,5%

→ Tiempo de contacto 5 minutos

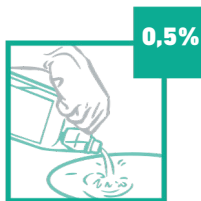

25ml en 5 litros

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS Y EMBALAJE

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Lectus DL3 - 5 litros	Caja de 4 bidones	SAAN1106
Lectus DL3 - 1 litro	Caja de 12 bidones	SAAN1107

## INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada de uso profesional. Utilizar mediante inmersión a una dilución del 0,5% (5ml/L) respetando el tiempo de contacto. Sumergir totalmente el producto sanitario. Cepillar si se observa suciedad visible.

Enjuagar con abundante agua para eliminar todos los residuos. Reemplace la solución después de cada lavado

## COMPOSICIÓN

Tensioactivos no iónicos, complejo trienzimático (proteasa, lipasa, amilasa), estabilizador de enzimas, secuestrante, conservador, excipientes

## PRODUCTO DE USO PROFESIONAL

Por favor lea el etiquetado del producto para más información.