

LECTUS GTA 2

GLUTARALDEHÍDO 2%

Indicado para desinfección de alto nivel/esterilización en frío de dispositivos médicos, de instrumental quirúrgico, de material de endoscopia y material termo-sensible.



CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Solución lista para usar
- Estabilidad en batea de 30 días
- Desinfección de alto nivel en 10 minutos
- Esporicida en 60 minutos
- Actividad frente a *Helicobacter pylori*
- Máxima compatibilidad con materiales
- Rendimiento seguro: tiras de control para asegurar la actividad del producto

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

CONDICIONES	TIEMPO DE CONTACTO
Bactericida EN 1040, EN 13727, NF T 72-171 NF T 72-190 <i>Helicobacter pylori</i>	5 min 10 min 10 min
Micobactericida <i>Mycobacterium tuberculosis</i> (B.K.) EN 14348 (M. terrae, M. avium) pr EN 14563 (M. terrae)	5 min 10 min
Levaduricida EN 1275 EN 13624, NF T 72-190	10 min 10 min
Virucida HIV-1, HBV, Herpes virus, BVDV (virus modelo HCV) NF T 72-180	5 min 10 min
Esporas NF T 72-230 T 72-301 (<i>C. difficile</i>)	60 min 30 min

INSTRUCCIONES DE USO

Solución lista para usar de uso profesional. No diluir. Limpiar y enjuagar el dispositivo médico antes de sumergirlo en el producto. Cubrir la bandeja y dejar un tiempo de contacto de 10 minutos para desinfección de alto nivel y 60 minutos para esporas. No añadir ningún producto adicional. Enjuagar con abundante agua estéril o filtrada tras remojo.

Conservación máxima 30 días. Utilizar tiras GTA Test para validar la actividad de la solución.

COMPOSICIÓN

Glutaraldehído 2%, tampón, colorante, excipientes.

PRODUCTO DE USO

PROFESIONAL

Por favor lea el etiquetado del producto para más información.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS Y EMBALAJE

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Lectus GTA 2 - 5 litros	Caja de 4 bidones	SAAN1204
Lectus GTA 2 - 1 litro	Caja de 12 bidones	SAAN1203