

# LECTUS MTU



**DETERGENTE TRIENZIMATICO ULTRA CONCENTRADO**

Indicado para el lavado manual por inmersión en batea del instrumental médico-quirúrgico como paso previo a la Esterilización o la Desinfección de Alto Nivel.

## CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

COMPONENTE	FUNCION	BENEFICIO
Agentes secuestrante de nueva generación	Eliminación de iones que interfieren en la limpieza	Mayor efecto desincrustante
Agentes dispersantes	Evita que se aglutinen partículas de residuos sólidos que pueden precipitar o sedimentar	Minimiza la posibilidad de redeposición de la materia orgánica en el PM
Tensoactivos de nueva generación	Posibilitan una más alta concentración enzimática	Potencia la eficacia detergente
Agente anticorrosivo	Protección superficies metálicas	Compatible con dispositivos médicos metálicos

- Detergente **trienzimático** para uso manual
- Formulación original: **acción desincrustante reforzada**
- Actividad proteásica reforzada: **muy alto poder detergente demostrado**
- Amplia compatibilidad con los materiales
- Excelente **perfil ecotoxicológico**

## PRODUCTO A DILUIR

- Dilución de uso **0,2%**
- Tiempo de contacto: **5 minutos**

**Rendimiento: 2.500 litros por bidón**

## INFORMACIÓN DE PEDIDOS Y EMBALAJE

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
Lectus MTU - 5 litros	Caja de 4 unidades	SAAN1220
Lectus MTU - 1 litro	Caja de 12 unidades	SAAN1221

## INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada de uso profesional. Utilizar por inmersión a una dilución del 0,2% (2 ml por litro), respetando el tiempo de contacto de 5 minutos. Sumergir completamente el producto médico y cepillar si se observa suciedad visible. Enjuagar abundantemente con agua para eliminar todos los residuos. Reemplazar la solución al finalizar cada lavado.

## COMPOSICIÓN

Complejo trienzimático (proteasa; lipasa; amilasa) en alta concentración, tensoactivos no iónicos y aniónicos, inhibidores de corrosión, excipientes.

## PRODUCTO DE USO PROFESIONAL

Por favor lea el etiquetado del producto para más información.