

LECTUS R44



RENOVADOR DE INSTRUMENTAL DE ACERO INOXIDABLE

Indicado para pulir instrumentos de acero inoxidable. Elimina restos proteicos, depósitos de óxido de hierro y otras manchas de oxidación.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- **Elimina las manchas de óxido (pasivación)**
- **Suprime los depósitos minerales**
- **Utilización en remojo: sistema de dosificación incorporado**

• **Solución líquida límpida**

• **pH (producto diluido) a +20°C: aprox. 1,25**

PRODUCTO A DILUIR

→ Dilución de uso 5%

50ml en 1 litro



INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada. Antes de utilizar el producto, protegerse adecuadamente: barbijo, gafas, guantes. Utilización en remojo para diluir un 5% en agua templada. Sumergir el instrumental. Tiempo de remojo: 1 a 2 horas (controlar el estado del instrumental cada 30 minutos). Extraer el instrumental del baño cuando esté bien pulido. Enjuagar con abundante agua y secar. Renovar el baño al menos una vez al día.

INFORMACIÓN DE PEDIDOS Y EMBALAJE

| PRODUCTO | UNIDAD DE EMBALAJE | REFERENCIA |
|----------------------|--------------------|------------|
| Lectus R44 - 1 litro | Caja de 12 bidones | SAAN1250 |