

# LECTUSAFE PRO



## DETERGENTE DESINFECTANTE DE SUELOS Y SUPERFICIES

Indicado para la limpieza y desinfección de suelos, paredes y productos médicos.


### CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

- Combina acción detergente y desinfectante en una operación simultánea
- Eficacia demostrada en bacterias y humedades aisladas en el entorno hospitalario
- Producto formulado sin aldehído
- Optimización del perfil ecotoxicológico
- pH del producto diluido: aprox. 8,0

### PRODUCTO A DILUIR

→ Dilución de uso 0,25%

20ml en 8 litros

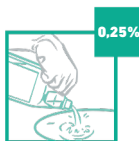

### PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS

Activo sobre	Normas	Tiempo de contacto (min)		
		0,25%	0,50%	1%
Bacterias	EN 1040, EN 1276, EN 13727	5		
	BMR (EN 1276)	5		
	EN 13697	30	15	
	BMR (EN 13697)	15		
Micobacterias	M. terrae (EN 14348, EN 14563)	60	30	
Levaduras	EN 1275, EN 1650	15		
	EN 13697	30	15	
	EN 1275	15		
Mohos	EN 13697	30		15
	EN 1650	120		
		5		
Virus	Según EN 14476. HIV-1, PRV (Virus modelo HBV), BVDV (virus modelo HCV), Herpes virus			
	Vacciniavirus	60	15	

### INSTRUCCIONES DE USO

Solución concentrada de uso profesional. Usar un paño limpio y escurrido previamente. Sumergir el paño o mopa en el recipiente con el producto preparado o en el recipiente con gatillo según su uso. Respetar el esquema de desinfección de arriba hacia abajo y desde el fondo a la salida. Dejar secar, no enjuagar. Después del uso en cada sector, cambiar el paño y renovar solución.

### COMPOSICIÓN

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropano-1,3-diamina CAS N° 2372-82-9, cloruro de didecildimetilamonio CAS N° 7173-51-5, excipientes.

### PRODUCTO DE USO PROFESIONAL

Por favor lea el etiquetado del producto para más información.

### INFORMACIÓN DE PEDIDOS Y EMBALAJE

PRODUCTO	UNIDAD DE EMBALAJE	REFERENCIA
LECTUSAFE PRO - 5 Litros	Caja de 4 bidones	SAAN1302
LECTUSAFE PRO - 1 Litro	Caja de 12 bidones	SAAN1303