


# LECTUS OPA 55

ORTOFTALDEHÍDO 0,55%



1

Verter el contenido del bidón de Lectus OPA 55 en la bandeja de remojo destinada a la desinfección

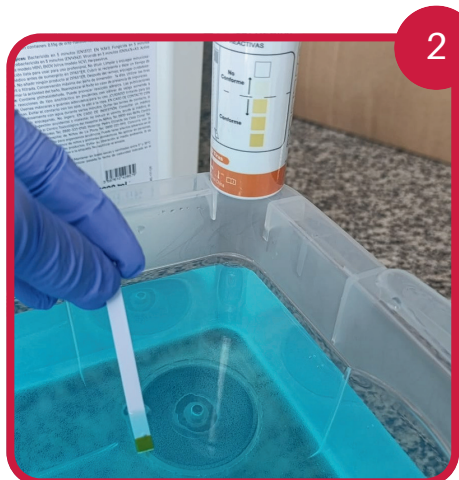

2

Utilizar la tira reactiva OPA TEST para confirmar la actividad del producto siguiendo los pasos



3

Con un resultado conforme, introducir el dispositivo médico limpio, seco y drenado




4

Tapar la bandeja de remojo y dejar 5 minutos. Máximo 30 minutos.



5

Enjuagar cuidadosamente

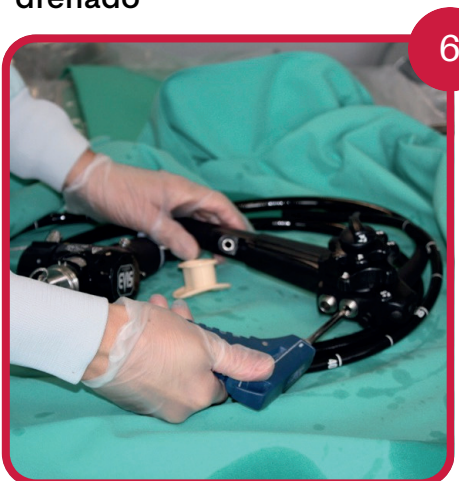


6

Secar con un tejido estéril, secar canales y conservar asépticamente

## USO OPA TEST

- Mojar la tira reactiva durante 1 segundo
- Sacarla sacudiéndola para eliminar el exceso de líquido
- Leer el resultado 60 segundos después de remojar
- Remitirse a los resultados

## RESULTADOS

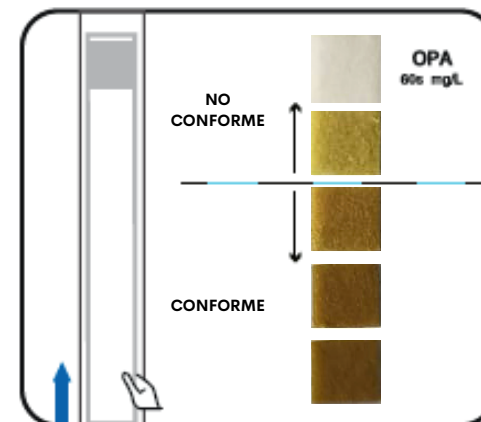

## RECOMENDACIONES

- Respetar tiempos de contacto y diluciones de los productos
- Utilizar solo tiras reactivas OPA TEST
- Conservación del baño de Lectus OPA 55 14 días como máximo